



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

V.1 2025

Producto **KIT EMERGENCIA QUÍMICA – BOTIQUÍN NARANJO ANTICORROSIVO**



Código **700013**

1. Descripción	Kit emergencia química – Botiquín naranjo anticorrosivo
2. Marca	Diphoterine® - Prevor

Características técnicas del producto

Gabinete para fijación mural para el almacenamiento y disposición de Ducha de emergencia química Diphoterine® formatos oculares y cutáneos.
Diphoterine® es una solución de lavado hipertónica, anfótera y polivalente.
Limita la penetración y detiene la agresividad del producto químico, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los primeros 60 segundos.

3. Imagen referencial



4. Contenido	Descripción		Contenido
	MINI Diphoterine® 200 ml – Lavado cutáneo		2 un
	LPM Diphoterine® Botella 500 ml – Lavado ocular		1 un
5. Características técnicas botiquín	Material	Placas de acero Lamina de acrílico (Tapa)	
	Dimensiones	28 x 8 x 30 cm	
	Otros	Pintura epóxica anticorrosiva	

Características Técnicas Diphoterine® MICRO DAP

6. Imagen referencial



7. Características Diphoterine

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química polivalente, anfótera e hipertónica. Permite evitar la quemadura química en una aplicación durante los 60 primeros segundos.

Mecanismo de Acción	Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.
Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico) y sus derivados, utilizar Ducha de Emergencia Química Hexafluorine®</i>
Uso	La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación.
Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II. <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>
Gas propelente	Dióxido de carbono (CO ₂) <i>Clase 2.2-Gas no inflamable según NCh 382/21.</i>

7. Ventajas	• Ducha autónoma portátil. • Lista para su uso, permite una acción rápida. • Chorro suave, microionizado que permite el lavado. • Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. • Transportable. • Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas. • No es toxico. • Libre de fosfatos. • Solución 100% esterilizada • Precinto que garantiza la integridad del dispositivo. • Conforme a la norma EN 15154 • Certificación CE.
8. Protocolo de uso	     Colocarse fuera del peligro Quitarse la ropa Lavar lo más rápidamente posible respetando el protocolo de la solución Diphotérine® Alertar Obtener una opinión médica
9. Superficie de intervención	• Formato indicado para proyecciones cutáneas de zonas como rostro y cuello, brazo completo y superficies corporales similares. • Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. • Usar el contenido completo. • En caso de lavado sobre rostro, no utilizar sobre ojos.  Usar 1 MINI DAP 200 ml

Características Técnicas Diphoterine® LPMD

6. Imagen referencial

The image shows a white plastic bottle of Diphoterine LPM with an orange cap. The label features the brand name 'DIPHOTERINE LPM' and some smaller text. To the right of the bottle is a circular inset photograph of a person's face and hands using the product. An orange curved line connects a circle containing the letters 'LPM' to the bottle and the inset photo.

7. Características Diphoterine

Diphoterine® es una ducha de descontaminación química polivalente, anfótera e hipertónica. Permite evitar la quemadura química en una aplicación durante los 60 primeros segundos.

Mecanismo de Acción	Diphoterine® encapsula, inactiva y lava de manera mecánica el químico de la superficie de los tejidos impidiendo que penetre. Gracias a su hipertonicidad logra extraer el químico que ha penetrado.
Cobertura	Permite la descontaminación de ácidos, bases, solventes, quelantes, oxidantes, reductores y alquilantes. <i>*En caso de HF (Ácido Fluorhídrico) y sus derivados, utilizar Ducha de Emergencia Química Hexafluorine®</i>
Uso	La solución Diphoterine® es de un solo uso, el contenido debe ser vaciado por completo para asegurar una correcta descontaminación.
Clasificación según MINSAL	Dispositivo medico clase II. <i>Regulado por Decreto Supremo N° 825/98 que aprueba el reglamento de control de productos y elementos de uso médico en Chile.</i>

7. Ventajas

- Portátil
- Lista para su uso, permite una acción rápida.
- Aplicador ocular ergonómico que facilita la apertura del ojo.
- Lavado suave sin presión y autónomo.
- Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.
- Transportable.
- Sin mantenimiento ni instalación particulares; no requiere alimentación, tuberías o válvulas, sin riesgo de fugas.
- No es toxico.
- Libre de fosfatos.
- Solución 100% esterilizada
- Precinto que garantiza la integridad del dispositivo.
- Conforme a la norma EN 15154
- Certificación CE.

8. Protocolo de uso



Colocarse fuera del peligro



Quitarse la ropa



Lavar lo más rápidamente posible respetando el protocolo de la solución Diphotérine®



Alertar



Obtener una opinión médica

9. Superficie de intervención

- Formato indicado para proyecciones oculares sobre los 10 segundos iniciales hasta los primeros 60 segundos desde que ocurre la salpicadura o para salpicaduras de grandes volúmenes de químicos.
- Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor.
- Usar el contenido completo.



DATOS DE CONTACTO

Sagita SpA www.sagita.cl / www.tienda.sagita.cl
hablemos@sagita.cl / 562 22441191 / 569 73765587